

Geenitestinäytteiden lähettäminen Labokliniin

1. Tilaa ilmaiset näyteenotto- ja lähetystarvikkeet Laboklinin Suomen toimistolta: info@laboklin.fi. Jos eläinlääkärisi käyttää Laboklinin palveluita, saat häneltä kaiken tarvittavan näyteenoton yhteydessä.
2. Eläinlääkäri/virallinen näyteenottaja ottaa näytteen ja tarkistaa samalla eläimen tunnisteen.
3. Täytä tutkimuslomake (shop.labogen.com/fi/hinnasto-ja-laehetteet) huolellisesti tekstaten. Valikoima, testinumero ja hinnasto löytyvät samalta sivulla.
4. Näyte postitetaan Laboklinin Suomen toimistoon: **LABOKLIN, tunnus 5017015, 01006 vastauslähetys**, josta näytteet lähetetään päivittäin kuriirikuljetuksena Saksaan Laboklinin laboratorioon.
5. Laboklin analysoi näytteen ja saat tulokset sähköpostitse (halutessasi myös postitse).
6. Saat Laboklinilta laskun tutkimuksista sähköpostitse. Lasku maksetaan Nordean pankkitilille.

LABOGEN
GENETIC TESTING BY LABOKLIN

LABOKLIN Suomen toimisto
Neitsytpolku 8 E, 00140 Helsinki, 044 067 5353
info@laboklin.fi | www.laboklin.fi

DNA-näyte

Geenitutkimus voidaan tehdä verinäytteestä tai poskisolunäytteestä

Huom! Virallista tulosta varten eläinlääkäri/virallisen näytteenottajan tulee tarkistaa eläimen tunniste ja allekirjoittaa lähete.

Verinäyte

Verinäyte otetaan EDTA-putkeen (1 ml riittää). Putkeen merkitään eläimen nimi ja mikrosirunumero.

Vanutikkujen/poskisoluharjan käyttöohjeet

1. Älä ruoki eläintä 2 tuntia ennen näytteenottoa, jottei näytteeseen tulisi muusta lähteestä peräisin olevaa DNA:ta.
2. Hankaa vanutikkua/poskisoluharjaa posken limakalvolla voimakkaasti 15 sekunnin ajan jotta siihen tarttuu riittävästi soluja.
3. Ota aina kaksi näytettä. Geenitestiä ei voi tehdä jos käytettävissä ei ole tarpeeksi geneettistä materiaalia.
4. Kuivata vanutikkuja/poskisoluharjaa tunnin ajan näytteenoton jälkeen. Liika kosteus voi pilata näytteen kuljetuksen aikana.
5. Merkitse eläimen tiedot (nimi ja mikrosirunumero) näytteenottoputkeen ja lähetä näytteet meille.

Näytteen pakkaus

Pakkaa näyte hyvin. Pakkauksen on koostuttava kolmesta osasta: näyteputki, suojarahkaus, esim. minigrip-pussi ja tukeva ulkopakkaus. Lähetä se postitse Laboklinin Suomen toimistoon: LABOKLIN, tunnus 5017015, 01006 vastauslähetys.

Muista laittaa tekstaten täytetty tutkimuslomake mukaan pakkaukseen.